


定時藥片盒

型號：201

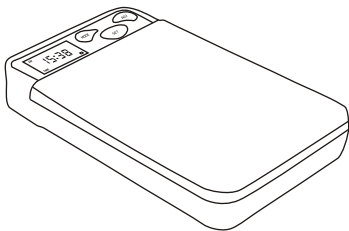


說明書

前 言

恭喜您擁有了當今最有效的定時藥劑盒，到了您該吃藥時，這個設計有提示功能的藥劑盒將在第一時間提醒您。在每個小時間隔提醒您用藥及在您睡覺後停止警報提示。


功 能

- * 有多重藥劑隔板，可放置每天不同的藥劑。
- * LCD顯示時間和鬧鈴提示
- * 雙重提示聲響及可視T1/T2圖標閃動
- * T1和T2兩個時間間隔選項
- * 防潮藥盒
- * 電源：1.5V DC的“AAA”（7號）電池
1粒

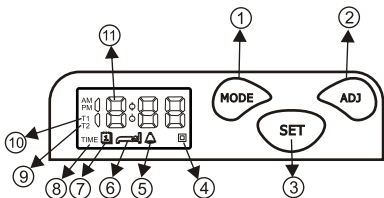

1. 模式按鈕
2. 調節按鈕
3. 設置按鈕
4. 鬧鈴停止圖標
5. 鬧鈴響動圖標
6. 靜音圖標
7. 基本的鬧鈴時間圖標
8. 真實時間模式時間顯示
9. T2時間間隔警報
10. T1時間間隔警報
11. 時間顯示

電池的安裝及替換

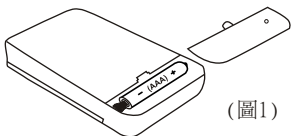


1. 打開電池蓋
2. 裝入一個“AAA”電池(參看圖一)，注意正、負極依電池盒標示正確安裝
3. 裝回電池蓋
4. 當鬧鈴聲變弱或LCD顯示變的模糊時，請重新更換一個新的“AAA”電池

時間&鬧鈴設置


當安裝或更換新電池時，時間將自動進入設置模式，下面是一個簡單的設置路線圖及設置程序。

快捷設置路線圖

時間設置

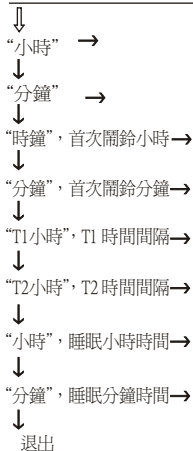

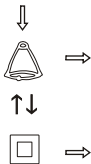

鬧鈴設置




定時設置程序

1. 按住“SET”鍵，直到“小時”數字閃動，這時處於設定模式下。(如果大約30秒鐘沒有任何操作，將自動退出設置模式)
2. 按“ADJ”鍵，調節當前正確的上午或下午的小時數字
3. 按“SET”鍵，轉換到分鐘數字閃動
4. 按“ADJ”鍵，調節當前的分鐘數字
5. 按“SET”鍵，圖標1和“時鐘”數字閃動，設定每天第一次吃藥時響。
6. 按“ADJ”鍵，調節所需正確的上午或下午的小時數字
7. 按“SET”鍵，圖標1和分鐘單位開始閃動
8. 按“ADJ”鍵，調節所需的分鐘數字(每按鍵一次，時間依“10”分鐘單位增加)

- 9.按“SET”鍵，圖標T1閃動，設置第一個時間間隔的鬧鈴提示
- 10.按“ADJ”鍵，調節需要的T1小時間隔，可選1到12小時
- 11.按“SET”鍵，圖標T2和“小時”數字閃動，設置第二個鬧鈴時間間隔(如果您不需要第二個時間間隔提示，可以跳過下列第12項操作，再次按“SET”鍵，讓時鐘處於“00”，以使T2不被激活)
- 12.按“ADJ”鍵，調節需要的小時，T2時間間隔，可選1到12個小時
- 13.按“SET”鍵，圖標“”和“小時”數字閃動，設置睡眠時間。(睡眠功能設置後，鬧鈴停止提示直到次日第一次吃藥提示)
- 14.按“ADJ”鍵，調節需要的睡眠“小時”數字
- 15.按“SET”鍵，圖標“”和分鐘數字將閃動。

16. 按“ADJ”鍵，調節所需的睡眠分鐘數字。(每按鍵一次，時間依“10”分鐘單位增加)
17. 按“SET”健，完成設定並退出時間設定模式

鬧鈴設置程序

1. 按住“MODE”鍵，直到“□”圖標閃動時，進入鬧鈴設置模式。
(如果進入此模式超過30秒沒有任何操作，它將自動退出鬧鈴設置模式)
2. 按“MODE”鍵，選擇下面其中一種鬧鈴模式：“ 鬧鈴”或“□”關閉。
3. 按住“MODE”鍵，直到圖標停止閃動，完成並退出設置模式。

注意：

- a. 當提示鬧鈴閃動時，可以按“MODE”鍵來停止提示，但是T1和T2將繼續閃動達30分鐘，以提醒您該吃T1或T2時間間隔的藥劑，在可視提示閃動期間，設置參數被保護，不能進入修改。
- b. “□”圖標關閉鬧鈴提示，必須在鬧鈴提示模式下設定才能激活定時藥盒片的功能。

進入待機模式

當您長時間不用藥片盒時，為節省電力，可按住“ADJ”鍵，直到LCD顯示消失，這時便進入待機模式。

從“待機”到“啟動”模式

按住“SET”鍵，直到LCD顯示，時鐘數字閃動，並進入設置模式，緊接著請按“時間設置”和“鬧鈴設置”重新設置時間和鬧鈴。

規格說明

- * 操作電壓：“AAA”電池×1，1.5V DC
- * 鬧鈴提示時間(60秒的鬧鈴時間和30分鐘的T1/T2可視提示)
- * 材料類型：PP